



Ibrugtagning:

1. Udtag elektronikboks fra dispenserkasse ved at løfte den lodret opad 1 cm, hvorefter den løsnes fra dispenserkassen.
2. Isæt batterier i elektronikboks. – LED indikator blinker 4 gange
3. Isæt elektronikboks i dispenser. Elektronikboks skal side fast på bagpladens 4 tapper og må ikke ligge løst.
4. Afvent 30 sekunder – LED indikator begynder at blinke med fast interval
5. Afvent yderligere 30 sekunder – LED indikator blinker 4 hurtige gange: elektronikboksen er nu nulstillet, og sensoren fungerer.

Vælg doseringsmængde:

Fjern flaske fra dispenserens. Hold funktionsknappen nede. Slip knappen når antallet af blink fra LED indikator angiver den ønskede indstilling:

1 blink	→	2 ml
2 blink	→	4 ml
3 blink	→	6 ml
4 blink	→	8 ml

Fejlfinding:

Kontroller batterier.

Sensoren aktiveres normalt i en afstand på 3-5 cm fra dispenserens underkant. Opleves der mod forventning kortere aktiveringsafstand (0-2cm) kan det afhjælpes ved at nulstille sensoren:

Nulstilling af sensor:

1. Udtag elektronikboks, og tag batterierne ud. Med batterierne ude, tryk og hold på funktionsknappen i ca 1-2 sekunder for at aflade elektronikken.
2. Isæt batterier, og isæt elektronikboks.
3. Afvent 30 sekunder – LED indikator begynder at blinke med fast interval
4. Afvent yderligere 30 sekunder – LED indikator blinker 4 hurtige gange: elektronikboksen er nulstillet, og sensoren fungerer.
5. Vælg evt. doseringsmængde.