

BRUGERVEJLEDNING

ST-2065 –0113-Skadeleje

danish
healthcare
design



Mekaniske forhold:

Længde [mm]:	2000
Bredde (efter ønske) [mm]:	650-1000
Højde (min/max) [mm]:	650/950 (+ madras) 300
Læfteevne [kg]:	24 V
Styring:	+/- 70
Ryghældning [grader]:	

Elektrisk:

Beskyttelse:	Type B
Kaplingskasse:	Normaltæt
Spænding:	24V
Frekvens:	DC
Sikringsstørrelse:	1x15 amp.
Batterityper:	1 stk. 24V BRYGEL AKKUMOLATOR- zba 14211
Operationstid pr. batteri:	Kapacitet 4,5 ampt.

Side 1 af 3

Låsning af hjul:

Lås hjulene på lejet ved, at trykke på den yderste del af metal- låse-pladen på hjulet.

Opladning af akkumulator:

Akkumulatoren anbringes i den medleverede ladestation og netadapteren sættes i 230 V AC stikkontakt. Ved ladning lyser en grøn og en gul indikatorlampe.

Når akkumulatoren er opladet slukkes den gule lampe.

Den grønne lampe vil stadig lyse.

Akkumulatoren kan ikke overoplades.

Elektrisk indstilling af lejets højde og trenselenburg:

Lejet kan indstilles til den ønskede position ved brug af håndstyringen.

Der kan til enhver tid foretages ændringer i indstillingen.

Indstilling af hoved/rygdæl:

Hoved og benende kan indstilles særskilt ved, at trykke på udløserhåndtaget, og derefter indstille hældningen på hoved eller bendel som ønsket.

OBS!

Betjening af stolen må ikke foretages uden at have læst brugervejledningen.

Instruktionerne i dette dokument skal følges da forkert betjening kan medføre skade på personer eller udstyr.

For at være sikret imod utilsigtede bevægelser i stolens motoriserede dele skal nødstop være aktiveret under operationer.

Da stolen ikke er boltet fast, er der mulighed for kipning ved særligt overkrops-tunge patienter.

Inden stolen anvendes til patienter, bør brugeren have indøvet en fornemmelse for, hvor meget der skal til, før stolen kipper.

For at undgå overophedning og unødvendigt slid af de mekaniske komponenter skal der køres med 10% intermittens - dvs. for hvert minuts kontinuerlig drift skal der holdes 9 minutters pause. Efter 2 minutters kontinuerlig drift vil stolen selv slå fra og køle ned.

Batteriet kan afgive brandfarlige gasser, og må derfor ikke opbevares, eller anvendes i tæt på åben ild eller udstyr, der kan afgive gnister.

Ved unormale lyde under drift må stolen ikke anvendes, og en tekniker skal kontaktes.

Da stolen ikke har jordforbindelse, vil der kunne forekomme statisk elektricitet. Dette kommer ikke fra stolens elektriske komponenter, men fra gnidning mellem forskellige materialer, som f.eks. et plastik dække eller patienters beklædning. Statisk elektricitet kan være skadeligt for de elektriske komponenter, og tekniker bør konsulteres hvis det opleves gentagne gange.

Stolen må kun serviceres af en af Danish Healthcare Design A/S' autoriseret tekniker.

Vask operationslejets sokkel, bordplade, udstyr og madrasser (betræk: se under kunstlæder) af med mildt sæbevand (sæbespånér) brug ikke ståluld, sprit eller skurepulver.

Teknisk vedligeholdelse er minimalt, da de belastede bevægelige dele er monteret med selvsmørende olie-bronzelejer.

Kunstlæder:

Ambla, Apollo, Forte er betrækket på Informs produkter den vinyl belagte vævning som kunstlæderet består af kombinerer luksuriøst udseende og komfort med holdbarhed og flammehæmmende egenskaber. Materialerne opfylder standard BS 5790 Del i type 2 Store X, der garanterer at de er særdeles velegnede til polstring af operationslejer.

Brandhæmmende egenskaber:

Kunstlæderet er brandhæmmende i henhold til DOEFTS 3 antændingskilder 5 og 7 og kan modstå antændingskilder 0,1 og 5 i henhold til B55852 ved brug af forskellige polstringsskum.

Rengøring:

Betrækket er modstandsdygtig overfor de fleste milde syrer og baser, drikkevarer samt overfor normal tilsmudsning.

Da betrækket ikke opsuger disse pletter kan det let og uden problemer tørres af. Almindelige rengøring foregår med lunkent vand, sæbe og svamp og eftertørres med en fugtig klud. Ved en sådan behandling vil betrækket bevare sit flotte udseende.

Periodisk eftersyn:

- Kontroller at sideskinner og skruer er ordentligt til skruet.
- Kontroller at hjulene løber let og at låsemekanismen fungerer tilfredsstillende.
- Kontroller at ledningsforbindelse er intakt.
- Smør kuglelejeføringen for ben pladen med sprayfedt f.eks. Würth kædefedt HSS 2000
- Kontroller at fod kontakterne er i orden og at der ikke er skader på lejets ledninger eller el tilførsels kabel til lejet.
- Kontroller at beslag for ben holdere er rigtig justeret og om nødvendig – efter juster disse.