

# BRUGERVEJLEDNING

danish  
healthcare  
design

## 904 Øre-Næse-Hals stol



### Beskrivelse:

Stolen kan hæves og sænkes elektrisk. Stolen kan endvidere elektrisk placere patienten i den ønskede stilling mellem siddende og liggende.

Stolen kan ved et tryk på en knap selv køre tilbage til udgangsstillingen. Bevægelser reguleres med fodkontakten, placeret på bagerste del af stolens fod.

Stolen er drejelig. Nakkestøtten kan manuelt indstilles i alle mulige positioner.

Side 1 af 3

## El forsyning:

Stolen forsynes med 230 V AC. På stolens sokkel er monteret en vippe hovedafbryder, som lyser grøn når stolen er tændt og klar til brug.

## Betjening af stolen:

Betjeningen udføres med 2 joystick og 2x1 impuls fodtrykkontakter.

- Joystick vippes op - stolen hæves
- Joystick vippes ned - stolen sænkes
- Joystick bagud i stolen - ryglæn/ben mod vandret
- Joystick frem i stolen - ryglæn/ben mod lodret

## 2x1 impuls fod kontakter funktioner:

Retur knappen kører stolen tilbage til udgangs position.

Retur knappen, holdes nede over 0,2 sek. til 3 sek.

## OBS:

Brugeren af stolen, skal være opmærksom på anbefalet drift tid: 2 min. drift / 10 min. pause af hensyn til motorens temperatur. Ved ibrugtagning af et nyt produkt, skal dette indlæres.

## Drejefunktioner:

Stolen er drejelig på soklen, dvs. et håndtag løsnes på siden af sædet og stolens overdel kan svinge rundt 90 grader til en side og 180 grader til anden side, låses på det punkt man ønsker.

## Stopfunktion:

Ved brug af Retur funktion, stoppes stolen ved kort aktivering af joystick.

## Indstilling af Hovedstøtten:

Hovedstøtten indstilles ved, at løsne håndtaget under nakkepuden samtidig med, at hovedstøtten flyttes til den ønskede position.

## Armlæn:

Armlæn drejes ned for, at lette patientens ind og udstigning af stolen. Armlænet låses i 2 trin, dvs. armlænene er parallel med ryglænet – når ryglænet er i vandret stilling, dette gør således ryg lejepladen bredere.

Ved, at trykke på udløseren under armlænet vippes armlænet ned. Når armlænet løftes tilbage, låses det automatisk i brugsstillingen.

## Mærkning:

Operationsstol type 904-ØNH er CE mærket i overensstemmelse med kravene i rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993, om medicinske anordninger. Den tekniske vurdering er bl.a. fortaget efter retningslinierne beskrevet i standarden En 60601-1. Fabrikanten er kun ansvarlig overfor påvirkninger, der har indflydelse på materiellets sikkerhed, pålidelighed og funktion, såfremt:

1. Montering, udvidelser. Justeringer, ændringer eller reparation, udføres af Inform autoriserede teknikere.
2. Den elektriske installation i det pågældende rum er i overensstemmelse med IEC's krav. (EU's krav).
3. Materialet benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

## Installation:

Operationsstolen monteres med 220 V AC, og med beskyttelsesjord. Stolen er sikret med 2 Amp



ill. 001 Fodtrykkontakt



ill. 002 Sokkel lås



ill. 003 Hovedstøtte

Teknisk vedligeholdelse er minimalt, De belastede bevægelige dele er monteret med selvmørende olie-bronzelejer og nylon lejer. Skal der foretages speciel rengøring eller er der i øvrigt spørgsmål angående rengøring/vedligeholdelse af stolen kontakt da venligst Danish Healthcare Design A/S.

Betrækket på alle Danish Healthcare Design A/S' produkter består af kunstlæder. Den vinylbelagte vævning som kunstlæderet består af, kombinerer luksuriøst udseende og komfort med holdbarhed og flammehæmmende egenskaber, som opfylder standard, BS 5790 Del i Type 2 Store X, der garanterer, at de er særdeles velegnede til polstring af møbler.

Betrækket er brændhæmmende i henhold til, DOE FTS 3, antændingskilder 5 og 7 og kan modstå antændingskilder 0,1 og 5 i henhold til B55852 ved brug af forskellige polstringsskum.

## Rengøring:

Vask operationsstolens sokkel, bordplade, udstyr og polster med mild sæbevand. Brug ikke ståluld eller skurepulver dog gerne sprit 80 %.

Betrækket er modstandsdygtigt overfor de fleste milde syrer, baser og drikkevarer, samt over for normal tilsmudsning. Da kunstlæder ikke opsuger disse pletter kan det let og uden problemer tørres af.

Almindelig rengøring foregår med lunkent vand, sæbe og svamp. Der eftertørres med en fugtig klud. Ved en sådan behandling vil betrækket bevare sit flotte udseende. Kraftige og fastsiddende pletter fjernes ved let skrubning med en blød børste.

Blege, slibe og opløsningsmidler samt syntetiske vaskemidler og voks aerosol spray må under ingen omstændigheder anvendes til rengøring af betrækket.

## Periodisk eftersyn:

Kontroller, at fod kontakterne er i orden og at der ikke er skader på stolens ledninger.

## OBS!

Betjening af stolen må ikke foretages uden at have læst brugervejledningen. Instruktionerne i dette dokument skal følges, da forkert betjening kan medføre skade på personer eller udstyr. For at være sikret imod utilsigtede bevægelser i stolens motoriserede dele skal nødstop være aktiveret under operationer.

Da lejet stolen er boltet fast, er der mulighed for kipning ved særligt overkrops-tunge patienter. Inden lejet anvendes til patienter, bør brugeren have indøvet en fornemmelse for, hvor meget der skal til, før stolen kipper. For at undgå overophedning og unødvendigt slid af de mekaniske komponenter skal der køres med 10% intermittens - dvs. for hvert minuts kontinuerlig drift skal der holdes 9 minutters pause. Efter 2 minutters kontinuerlig drift vil stolen selv slå fra og køle ned. Batteriet kan afgive brandfarlige gasser, og må derfor ikke opbevares, eller anvendes tæt på åben ild eller udstyr, der kan afgive gnister.

Ved unormale lyde under drift må stolen ikke anvendes, og en tekniker skal kontaktes.

Lejet er tilført 230V med jordforbindelse.

Stolen må kun serviceres af en af Danish Healthcare Design A/S' autoriseret tekniker.